



Tillykke med din nye medicindoserer!

Kontrollér at kassen indeholder følgende:

- 1 stk. komplet Medliq dockingstation inkl. beholder
- 1 stk. regulator
- 4 m luftslange, Ø 8 mm
- 4 m ledning med strømtyv
- 1 stk. tilbehørspose med strips, bor, unbrakonøgle og T-stykke.



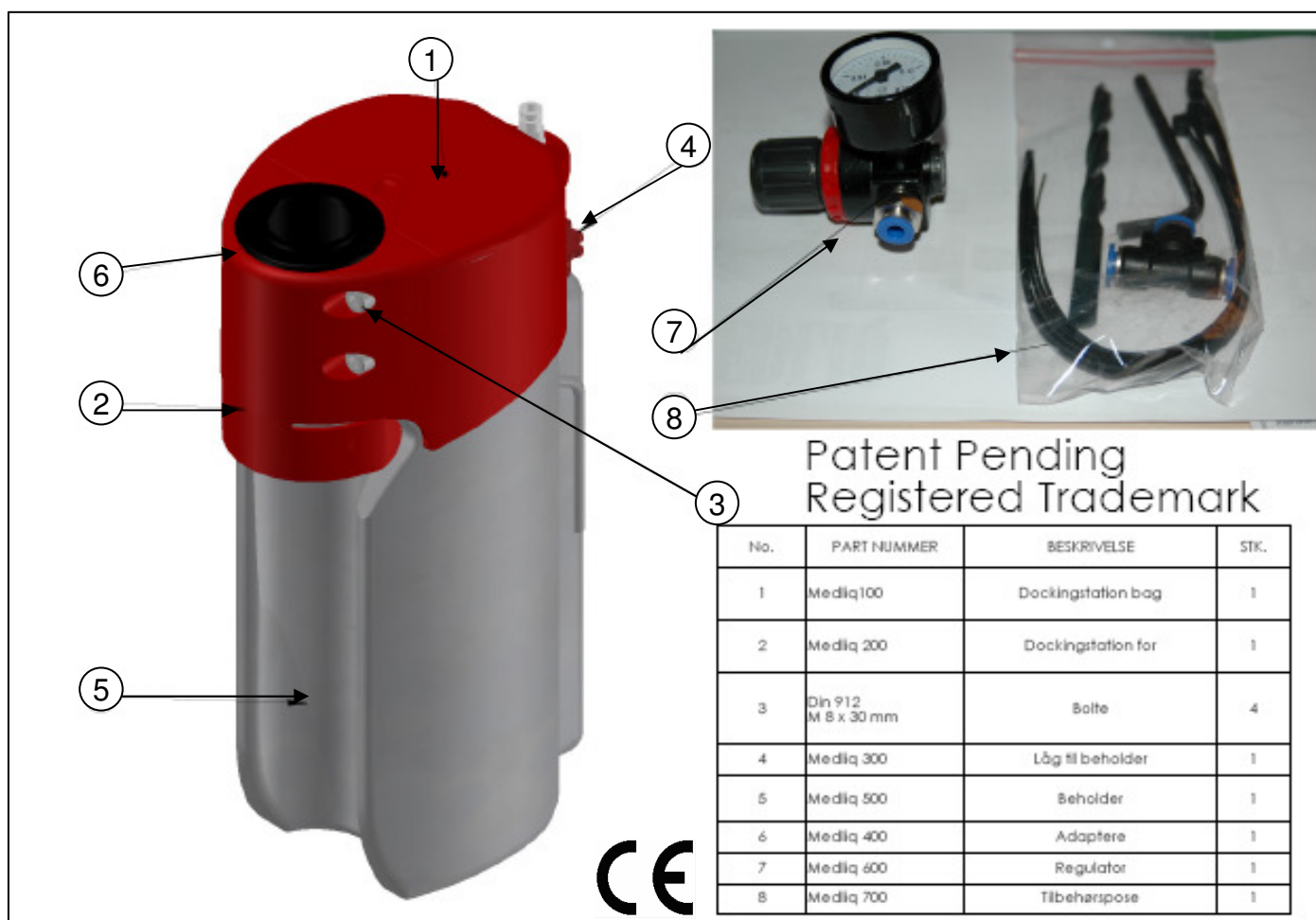


Fig. 1

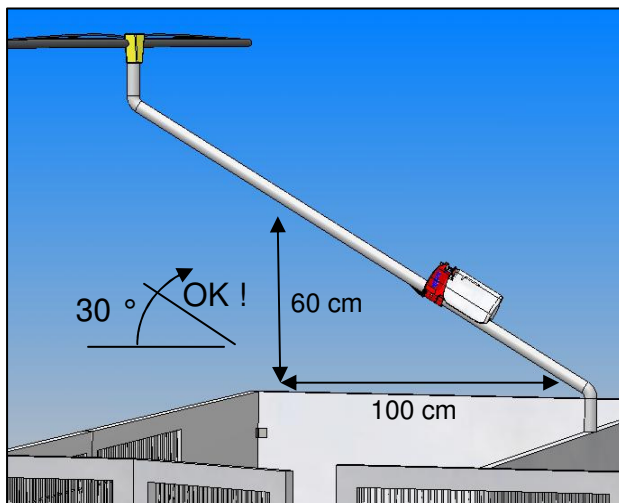

Ved skråtstillet foderrør skal vinklen være minimum 30 grader svarende til min. 60 cm i en afstand af 100 cm fra bøjningen mod vådfodringsvæggen.

Fig. 2

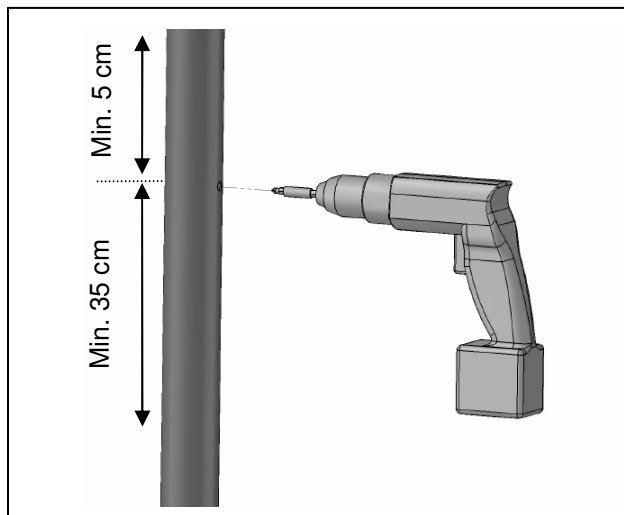


Vigtige råd før montage!

Før du borer kontrollér, at der er plads til Medliq. Dvs. 5 cm over og 35 cm under hullet skal være frit rør. Ellers kan beholder og dockingstation ikke være der.

Er dit vådfodringsrør af plast, kan du umiddelbart bruge boret i posen. Har du stålrør, skal du bruge et mindre bor til at bore for med.

Tryk ikke for hårdt med boremaskinen. Det kan få røret til at revne.

Fig. 3

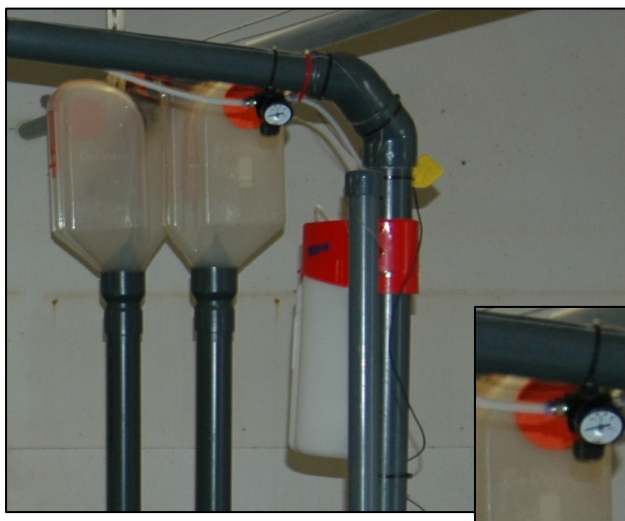

Når dockingstationen er monteret, stripses ledning og luftslangen fast på faldrøret.

Strips regulatoren fast så den kan ses fra gangen.

Fig. 4 Montering af dockingstation


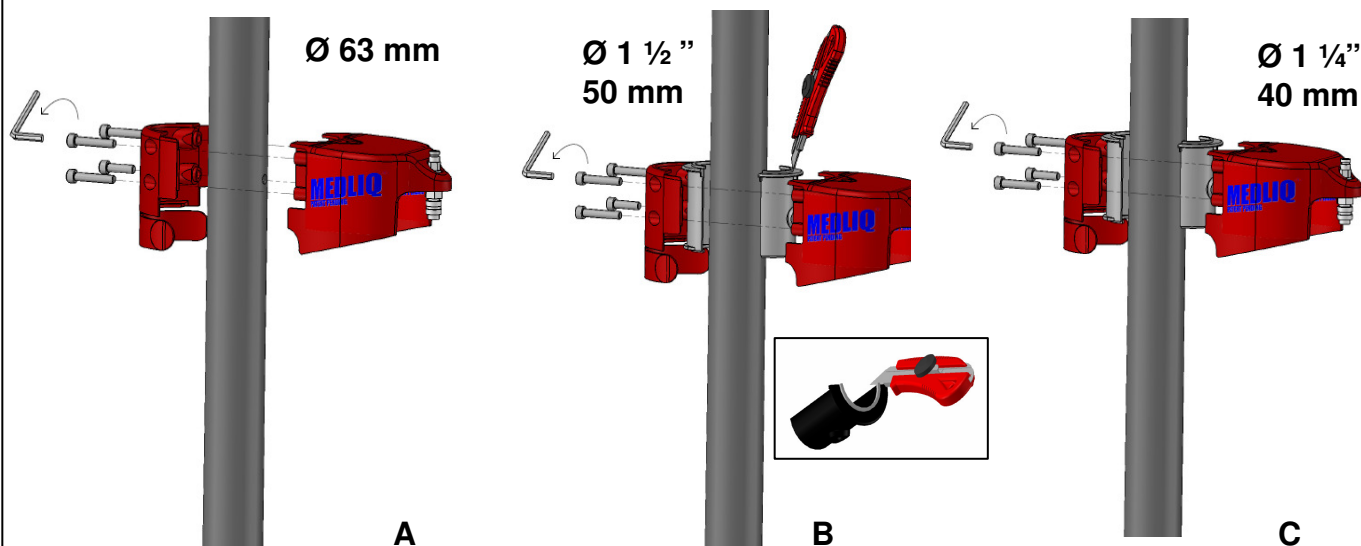


Fig. 5

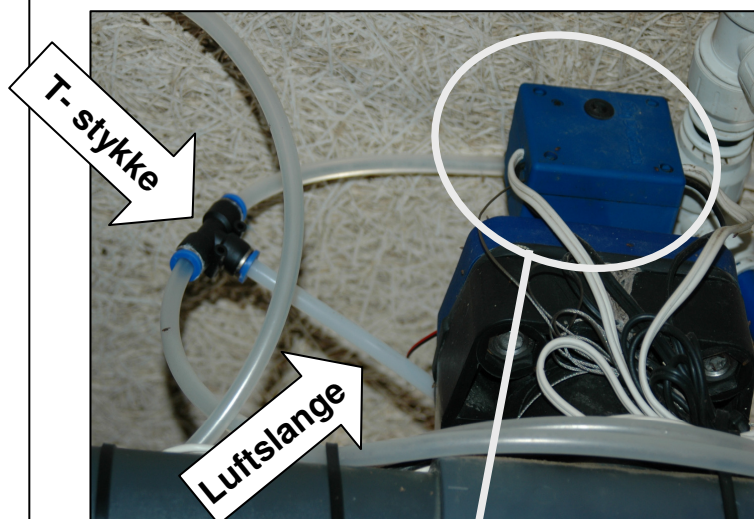


Kontrollér at din luftslange til ventilen er Ø 8 mm! Ved anden diameter rekvirer nyt T-stykke hos Hatting.

Ved Ø 8 mm:
Skær luftslangen over et passende sted og monter T-stykket.

Pas på! Der er tryk på! Hold godt fast på enderne!

Fig. 6

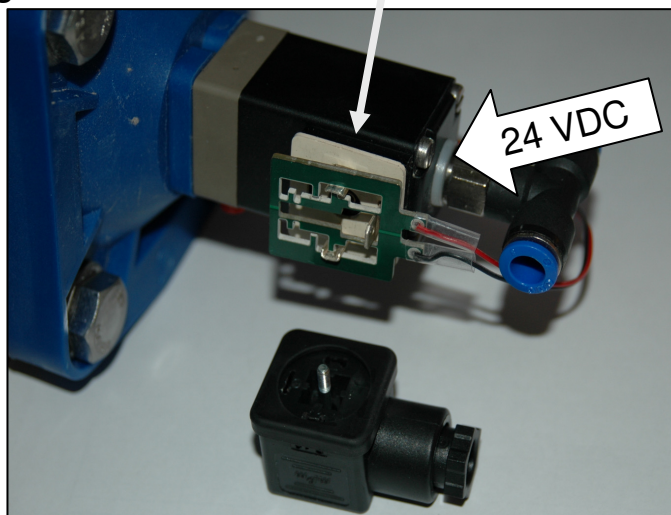

Find stikket til din ventil og skru den lille skrue ud. Demontér stikket.

Strømtv


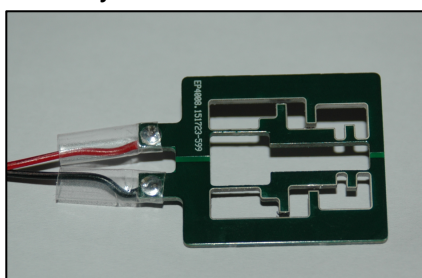


Fig. 7

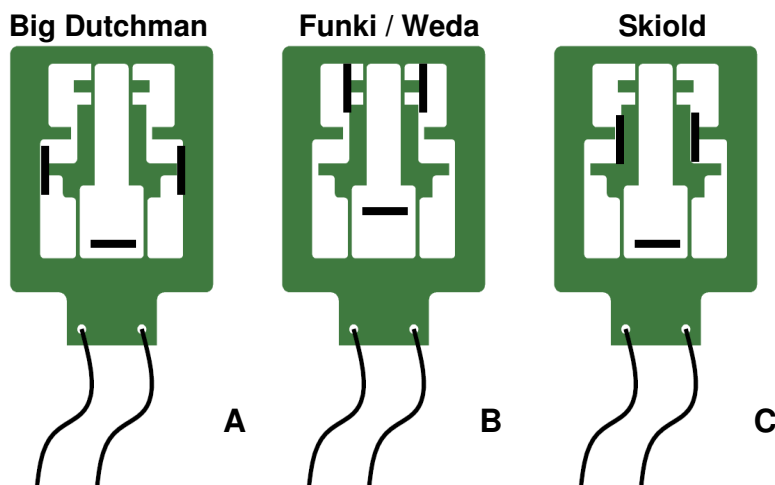


Din ventil har 3 stikben, 2 sidder parallelt og ét sidder på tværs af de to andre.

Monter strømtynen ned over de to parallelle ben så den har forbindelse. Det tværgående ben skal ikke have forbindelse.

Skrue stikket på igen så strømtynen sidder imellem stik og ventil.

Fig. 8

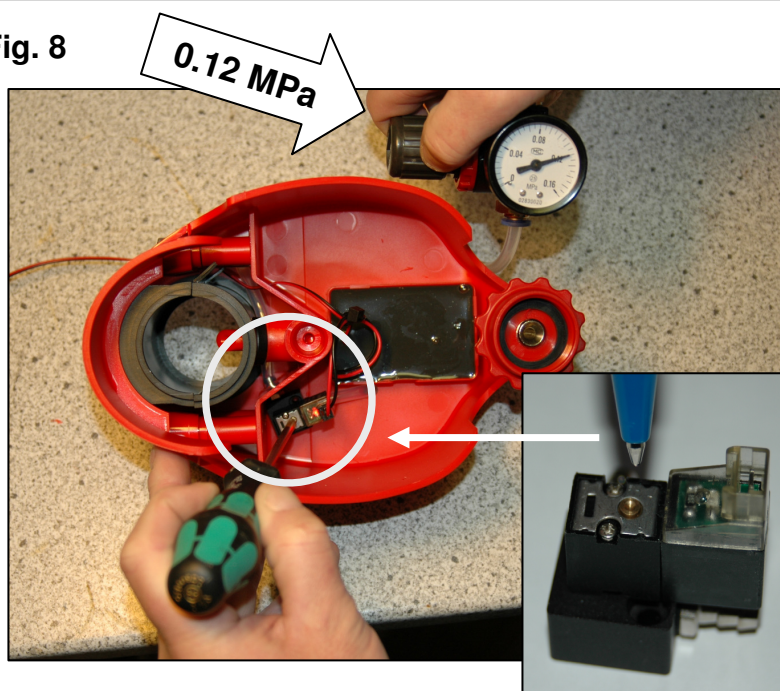

Nu skal Medliq kalibreres, det gør du ved at montere låget i lynkoblingen på dockingstationen.

Tag en kuglepen eller den lille skruetrækker du brugte til stikket og pres på den gyldne knap på luftventilen inde i dockingstationen.

Løft manometrets knap og drej til viseren står på 0.12 MPa. Tryk knappen ind igen og den er låst.

Fig. 9



Færdigmonteret Medliq

Klar til brug!